

クリアフロア(マグネット式ケーブルクランプ)取扱説明書

【警告】心臓ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器を装着している患者ベッドでの使用は控えること。誤作動の危険があるため。

【使用上の注意】

- ロックをしないまま使用をしないこと。
- ロックが破損した場合は、使用を中止すること。
- 磁石の破損などによる吸着力の低下が見られる場合は、使用を中止すること。

以上、ケーブル脱落により、患者転倒などを避けるため

- 外す際に磁石吸着部と直角方向に力をかけると、ロック部やリング部の根元が破損する恐れがあるので、平行方向にスライドさせること。
- 医療用のチューブ類の固定は想定していないため、注意すること。(輸液ラインなどチューブ類とロック部の過度な圧によるチューブ破損など)
- 携帯電話やアナログ時計、磁気カード、磁気テープなど磁気記録媒体に近づけないこと。

【本品紹介、使用目的】 本品は、医療用機器の AC 電源ケーブルを病棟フロアに這わせずに、ベッドフレーム下等で保持することにより、患者様の転倒防止および、ケーブルの衛生的管理、医療スタッフの作業効率化を目的とする。

【取扱説明】 AC 電源ケーブルに本品のリング部のロックをかけた状態で保管し、使用時にはマグネット部分をベッドフレーム下へそのまま吸着させることで簡易に使用でき、紛失の恐れが少ない。フレームから外す際にフレームから引きはがすように直角に力をかけると、ロック部やリング部の根元が破損しやすいので、平行方向にスライドさせると外しやすい。

【貯蔵・保存方法】 磁石は非常にもろいので、衝撃等を加えないこと。

【包装】 1袋 10 個入り

一般的名称	製品名	製品番号	クラス分類	販売単位	JANコード
マグネット式ケーブルクランプ	クリアフロア	MHC-CF	薬事法上、非該当	10 個/1 袋	4589967900067

【製品販売元】

マインヘルスケア株式会社

熊本県上益城郡益城町田原 2081-10

くまもと産業支援財団内 夢挑戦プラザ 7号室

info@minehealthcare.co.jp

<http://minehealthcare.co.jp/>